




Istruzione per l'uso

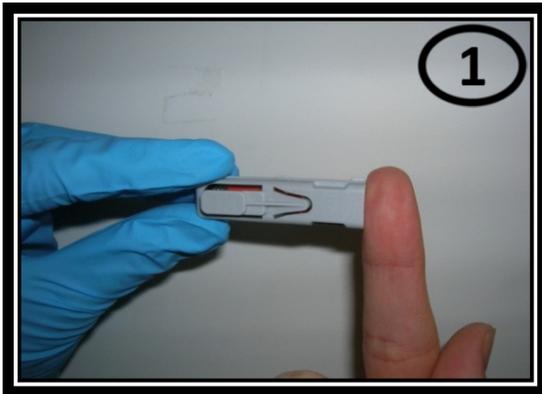

1
Premere saldamente la lancetta contro la punta del dito e azionare il pulsante per effettuare la puntura.

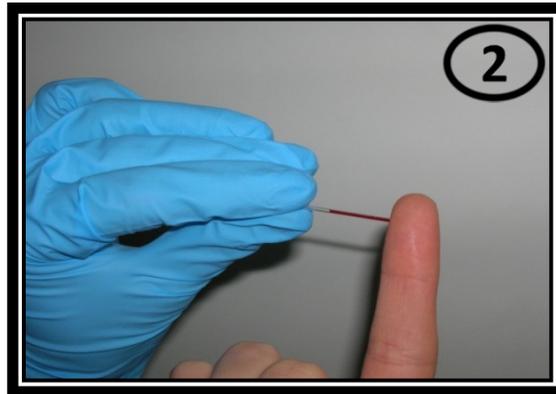


2
Posizionare il capillare orizzontalmente nella goccia di sangue, fino a riempirlo completamente.

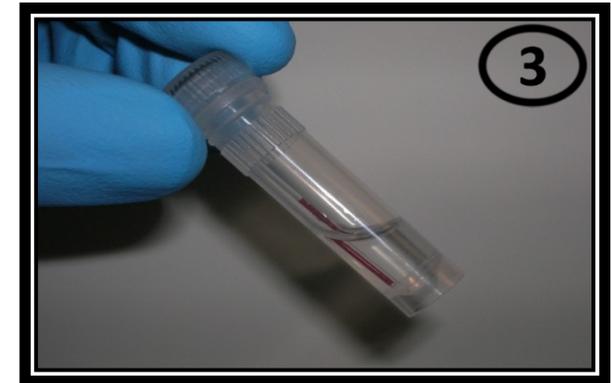

3
Inserire il capillare nella provetta contenente il tampone, chiudere la provetta e agitare energicamente.



4
Prelevare una piccola quantità di soluzione contenuta nella provetta. Posizionare verticalmente la pipetta contenente il campione sopra il pozzetto e versare tre gocce. Non toccare né spostare la piastrina per due minuti.

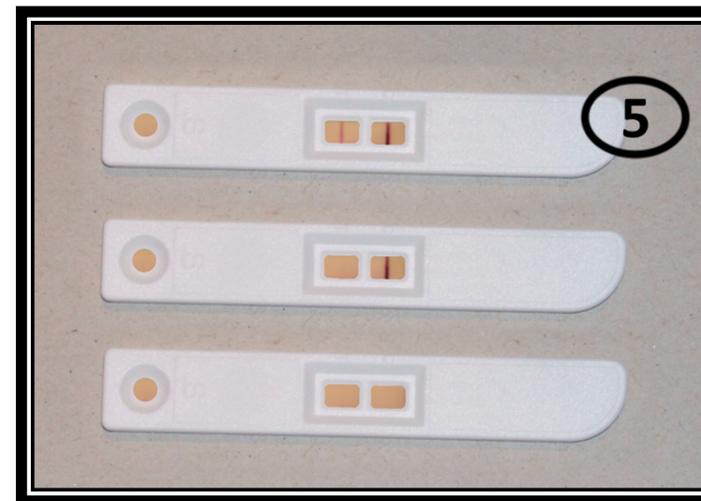

5
Lettura dopo 5 minuti.

Due trattini rossi: il test è positivo.
Un trattino rosso: il test è negativo.
Nessun trattino: carenza di IgA.